

Tento uživatelský návod je určen pro obsluhu zařízení „Elektrické hygienické stanice SUDAC30“ pro UV-C čištění a vysoušení sluchadel/tvarovek a sluchátek do uší.

Návod k obsluze

1. Rozsah dodávky jednotky.
2. Zapijte USB kabel do zásuvky, umístěné na boční straně vašeho zařízení. Připojte jej k napájecímu zdroji nebo k počítači. Zařízení je nyní připraveno k použití.
3. Použijte vlhký hadřík na očištění povrchu sluchadel/tvarovek nebo sluchátek do uší.
4. Vyjměte ze sluchadel baterii (pokud lze).
5. Otevřete víko zařízení a vložte sluchadlo/tvarovku nebo sluchátka do uší do vysoušecí komory.



Stiskněte tlačítko s dotykovým senzorem.

LED kontrolka se rozsvítí.

Proces čištění se zahájí po zavření víka.

6. Nejprve se spustí cyklus UV-C čištění (8 minut).
7. Potom se spustí cyklus vysoušení (142 minut).
8. Cyklus UV-C čištění/vysoušení je ukončen po zhasnutí LED kontrolky.
9. Vložte baterii zpět do sluchadla. Předtím, než sluchadla/tvarovky nebo sluchátka do uší znovu použijete, je nechte několik minut vychladnout.
10. Pokud se během UV-C čištění/vysoušení dotknete senzorového tlačítka na více jak 3 sekundy, můžete zařízení předčasně vypnout.

Charakteristika výkonu

Popis: Elektrická hygienická stanice

Model/referenční typ: SUDAC30

Klasifikace:

- Třída II
- Vstupní jednotka: 5,0 V; 3,5 W
- Provozní podmínky: 10 °C až 37 °C; při relativní vlhkosti maximálně 80%
- Vysoušení: při 40 °C ± 3 °C
- Nastavení časovače: UV-C čištění cca 8 min; vysoušení cca. 142 min
- Rozměry zařízení: 115 x 86 x 38 mm

Upozornění!

- Jednotka má 3 zdroje (UV-C) světla.
- Nedívejte se přímo do zdroje UV světla.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití v interiéru.



Důležitá informace


- Zařízení může být používáno dětmi od 8 let věku a staršími a osobami se sníženou fyzickou a kognitivní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo po obdržení pokynů k bezpečnému používání zařízení a porozumění souvisejících rizik.

- Zařízení nepatří do rukou dětem.
- Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.
- UV záření může změnit barvu krytu sluchadla.
- Zařízení je vhodné pouze pro sluchadla/tvarovky odolné vůči UV záření a sluchátka do uší.
- Pokud se na zařízení projeví jakákoli porucha, odpojte ho a doneste obratem prodejci.
- Zařízení nerozebírejte.
- Zařízení má 3 zdroje UV světla (UV-C). Nedívejte se přímo do zdroje UV světla.
- Během údržby a servisu musí být zařízení zcela odpojeno od napájení.

Likvidace odpadu



Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že zařízení nesmíte odhodit do běžného domovního odpadu. Zařízení odevzdejte na sběrném místě určeném ke shromažďování elektronického odpadu. Správnou likvidaci chráníte životní prostředí a zdraví.

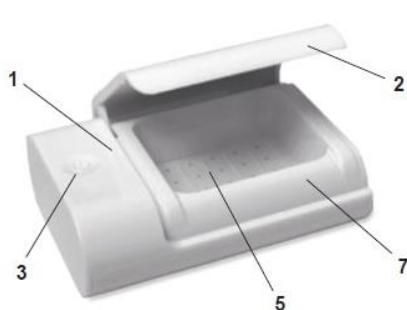

Popis produktu

- 1 Světelná LED kontrolka
- 2 Víko zařízení
- 3 Tlačítko s dotykovým senzorem
- 4 Konektor pro USB-C
- 5 Hygienická komora pro UV-C čištění a vysoušení
- 6 Zdroj UV-C světla




Zařízení a komponenty



Napájení pomocí USB kabelu



Vyčistíte povrch sluchadel nebo tvarovek vlhkým ubrouskem.

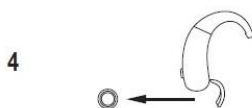


Vyjměte baterii (pokud lze).



Zapněte zařízení.



Čištění UV je dokončeno po 8 minutách.

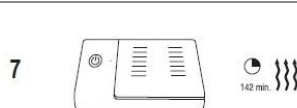

Následně začne vysoušecí proces, který trvá 142 minut.



Jakmile LED kontrolky zhasnou, vysoušecí proces je dokončen.



Nechte sluchadla chvíli vychladnout. Vložte nazpět baterii.



Stisknutím tlačítka na více jak 3 sec můžete zařízení vypnout.