


Press and hold the on/off button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Stiskněte a držte tlačítko zapnout/vypnout spolu s malým tlačítkem označeným ikonou řetízku na zadní straně dvě sekundy.

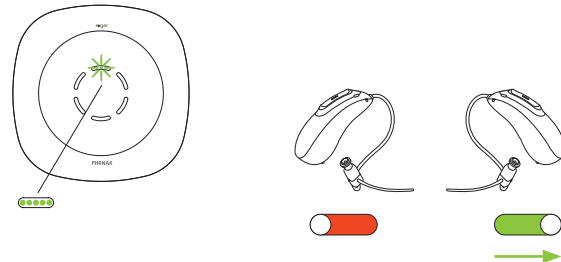


You should see a flashing green LED now. Switch on your right hearing aid and place it close to Roger Table Mic.

Sie sollten nun eine blinkende grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr rechtes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger Table Mic.

Vous devriez voir maintenant une LED verte clignotante. Allumez votre aide auditive droite et placez-la à proximité de Roger Table Mic.

Nyní byste měli vidět zeleně blikající kontrolku LED. Zapněte vaše pravé sluchadlo a umístěte ho co nejbližší k zařízení k Roger Table Mic.

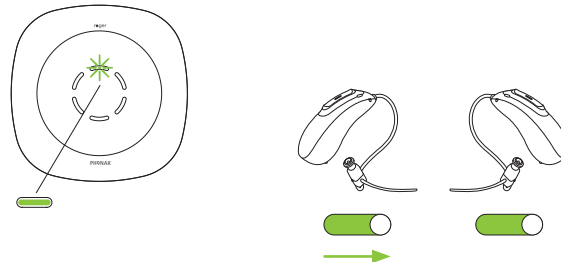

Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch on your other hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr anderes Hörgerät wieder ein.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Allumez votre autre aide auditive.

Počkejte pár sekund, dokud se nerozsvítí zeleně kontrolka LED. Poté zapněte vaše druhé sluchadlo.

Model: Roger Table Mic 3

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Švýcarsko

www.phonak.com/roger


sonova
HEAR THE WORLD

PHONAK
life is on

A Sonova brand

Roger™

RogerDirect™ Setup Guide for Roger Table Mic
RogerDirect™ Verbindungsanleitung für Roger Table Mic
Guide de connexion RogerDirect™ pour Roger Table Mic
RogerDirect™ Průvodce nastavením pro Roger Table Mic

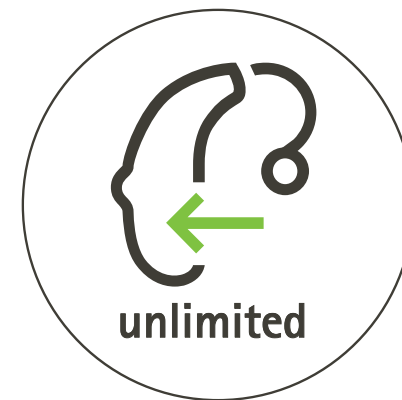


029-3373-45/V1.00/2025-02/ha/SB © 2024 Sonova AG Všechna práva vyhrazena



roger

1

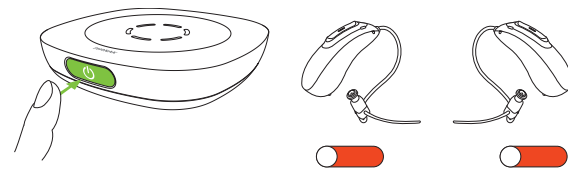


Switch on your Roger Table Mic.

Schalten Sie den Roger Table Mic ein.

Allumez votre Roger Table Mic.

Zapněte váš Roger Table Mic.

2

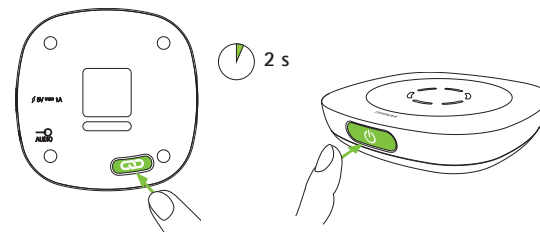


Press and hold the on/off button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig Ein-/Aus-Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Stiskněte a držte tlačítko zapnout/vypnout spolu s malým tlačítkem označeným ikonou řetízku na zadní straně dvě sekundy.

3

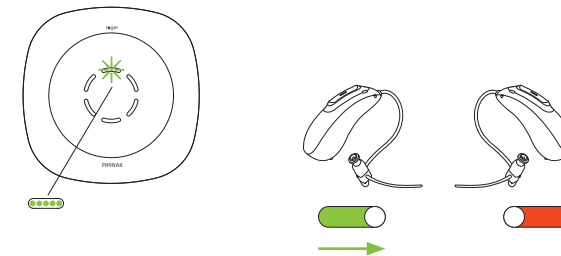


You should see a flashing green LED now. Switch on your left hearing aid and place it close to Roger Table Mic.

Sie sollten nun eine blinkende grüne LED sehen. Schalten sie nun Ihr linkes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger Table Mic.

Vous devriez voir une LED verte clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive gauche et placez-la à proximité de Roger Table Mic.

Nyní byste měli vidět zeleně blikající kontrolku LED. Zapněte vaše levé sluchadlo a umístěte ho co nejblíže k zařízení Roger Table Mic.

4

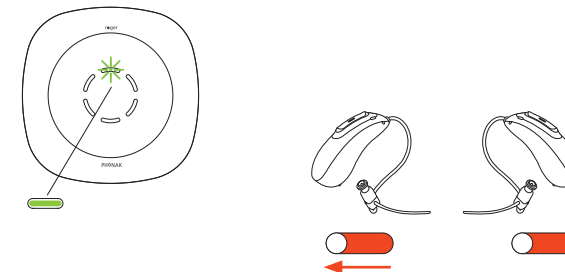

Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch off your left hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten Sie dann Ihr linkes Hörgerät wieder aus.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Eteignez maintenant votre aide auditive gauche.

Počkejte pár sekund, dokud nevidíte zeleně svítit kontrolku LED. Poté vypněte vaše levé sluchadlo.